

# Manikin Face Shield – User Guide

箱よりフェイスシールドを一枚分引出し、ミシン目のところで破ります。  
Pull out and tear off.

フェイスシールドを下部のようにマネキンの顔の上（口-鼻人工呼吸の場合は、鼻の上）に置きます。  
Place shield over manikin's head as illustrated (for mouth-to-nose ventilation, place shield over nose).

下部のように両手を添えてフェイスシールドを保持し、気道を確保します。  
Secure shield by placing the hands as shown to open the airway.

フェイスシールドの上から唇を当て、鼻をつまんで人工呼吸を行います。  
Place your lips over the shield, pinch the nose and ventilate.


使用後は廃棄して下さい。  
Discard shield after each use.

USE A NEW MANIKIN FACE SHIELD EACH TIME YOU PRACTICE      人工呼吸訓練の実施毎に、新しいフェイスシールドをご使用下さい。



(Carton graphics)

## Manikin Face Shield – User Guide

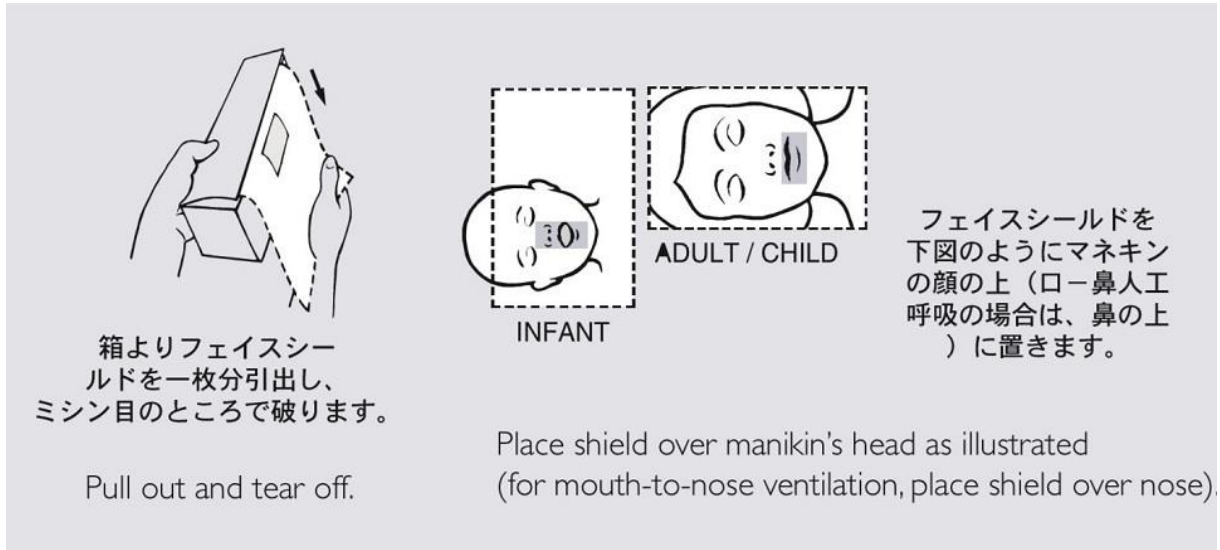

箱よりフェイスシールドを一枚分引出し、ミシン目のところで破ります。

Pull out and tear off.

フェイスシールドを下図のようにマネキンの顔の上（ロー鼻人工呼吸の場合は、鼻の上）に置きます。

Place shield over manikin's head as illustrated (for mouth-to-nose ventilation, place shield over nose).

INFANT

ADULT / CHILD



下図のように両手を添えてフェイスシールドを保持し、気道を開保します。

Secure shield by placing the hands as shown to open the airway.

フェイスシールドの上から唇を当て、鼻をつまんで人工呼吸を行います。

Place your lips over the shield, pinch the nose and ventilate.

USE A NEW MANIKIN FACE SHIELD EACH TIME YOU PRACTICE



使用後は廃棄して下さい。

Discard shield after each use.